

MADA filter conversies 2023

Nieuwe tabel voor calibratiecode Mondstukken Welch Allyn in combinatie met MADA83 voorzetfilter. De 3 liter ijkcontrole van de USB spirometer moet altijd met filter.

Instructie voor in gebruik name van nieuwe flow-transducers/mondstukken of wijzigen van calibratiecode voor filter:

- Klik op linksboven: **[Bestand Instellingen]**



- Klik op **[Opname]** ga naar tabblad **[Opname]**:

Pak de doos met nieuwe of de doos met flow-transducer en kijk of de lotcode* in de tabel staat.

Etiket op de doos:



Let op de houdbaarheidsdatum!

Vul de lotcode met de bijbehorende kalibratiecode die in de tabel staat.

A small window titled 'Sensor kalibratiegegevens'. It contains a 'Lotcode' dropdown menu, a 'Kalibratiecode' text input field, and a 'Verifieer' button.

Klik eerst op <verwerk> en daarna op <ok>:

A dialog box with four buttons: 'OK', 'Annuleer', 'Verwerk', and 'Help'.

Codes die niet op de lijst staan, kunnen opgevraagd worden via HRC_EMEA_Support@baxter.com

Calibration Codes Lot 3811-3872

3856	86DYP6QY7Y
3857	TVPCTXF22GC
3858	6JXWT2498
3859	J4K4WF9HC
3860	T86839MKPR
3861	WW38G9DGQ
3862	WYVRXDCMGG
3863	8GGBGMHTP74
3864	8Y9R4WQDQ
3865	MC3KMY67XWF
3866	W9C4PPC47
3867	MCWVGKJHV6XF
3868	M3TJGVTGB
3869	6BG47HQXQR
3870	JPD2G79FQ
3871	6397DHQCRF6
3872	WFBY4VH77
3873	8GFRPWG47Y
3874	6DBK2QF78
3875	6F6D269KXH
3876	6VF8F98W2
3877	JBR282QXH
3878	THC23D3VVH
3879	YPCYPPDCTW
3880	3V2TY2RBM
3881	87DPYTV8J8
3882	38B7T2VY3
3883	B6DDVPFBPWF
3884	GR3TYK8C8
3885	WGY2WDTFY6H
3886	6HTX66VX2
3887	YHR2J3TWRW

3888	YFWCT8JKB
3889	JWPWT79TH8
3890	JKVJWCYKC
3891	W4WM424TQ6B
3892	QPWJG38D9
3893	DFXP9J8XMKK
3894	6BQD3837K
3895	WTJTFQ9CFG
3896	G29H9MY4K
3897	8D4DQDC4J4H
3898	G39T7T8W2
3899	363KPJFCK
3900	W8RKW7BFQ
3901	3CWJ84G89V
3902	MMC89YQCP
3903	WFRPYM6TQ6B
3914	DK67RVMPH4
3915	YCMP48FKMP8
3916	YPH6JYDJFW
3917	DDY863KVWT
3918	MGFH96FJFW
3919	83JPRHKPBG
3920	N/A
3921	MCDBPMKXQ6
3922	QBB7GVFBF4
3923	Q4XRDC3RXT
3924	83KF2Q8B6G
3925	TFXCFD47T2
3926	M4367B9GJM
3927	GJF2TYV9R2
3928	JT33RFMD2Q
3929	8MVPFRP3WX

3930	WYP4WYVV4G
3931	8W46YQMY3G
3932	WYBYMP8B6G
3933	G837DFHVQ2
3934	QQDYBJDM3K
3935	6K86GBJXHH
5480	G9423GY78
5481	3P3GXFJM9V
5482	36YWP2HQF
5483	BPD28JRXXD
5484	3YD492HQF
5485	J7QKQRDQ9Y
5486	QH3Q4P9JGC
5487	B4THQYQCP
5488	DD3MW874BV
5489	G6KGRP7C2J
5490	39KYK362HC
5491	MBBGJ346QW
5492	BX46C4FHKW
5493	QVMKDCF8FC
5494	BFCJTTRXKW
5495	WJ6CBG4M6Y
5496	TP88F3PBQH
5497	TW9JBT68K
5498	TVQVF7P9WH
5499	T2H6R2FB2J
5500	BQY7H6TXG
5501	DFYGFVTCG4
5502	BX4F3J7MJW
5503	MH44M4TKY6
5504	M8G4TRVDTD